

## **Anleitung zur Anfertigung eines Schleimhautabstriches mit dem PapaGenom® Abstrichbesteck**

1. Falls die Person, bei der die Probe entnommen werden soll, kürzlich gegessen oder einen trockenen Mund hat, muß der Mund gründlich mit Wasser gespült werden.
2. **Ziehen Sie Handschuhe an.**
3. Klappen Sie den Schutzdeckel der Probensammelkarte auf, so daß der aufgedruckte Kreis zu sehen ist. Fassen Sie die Karte nur an den Rändern an. Legen Sie die Karte mit der Vorderseite nach oben auf eine ebene Fläche.
4. Nehmen Sie das Wattestäbchen aus der sterilen Verpackung, Berühren Sie die Watte nicht mit bloßen Händen.
5. Führen Sie das Wattestäbchen in den Mund und warten Sie, bis sich die Watte mit Speichel vollgesogen hat (Wenn die Watte zu trocken ist funktioniert es nicht).
6. Reiben Sie mit dem Stäbchen kräftig immer vor und zurück an der Innenseite der Wangen, am Zahnfleisch und an der Zunge.
7. Rollen Sie anschließend das Wattestäbchen mehrmals fest auf dem bedruckten Kreis der Probensammelkarte, um soviel biologisches Material wie möglich auf die Karte zu übertragen. Den Erfolg der Probenentnahme erkennen Sie daran, daß sich die Karte von rosa nach weiß verfärbt. **Bitte nicht rubbeln, sonst wird das Papier beschädigt.**
8. **Lassen Sie die Karte trocknen, das dauert etwa 45 Minuten.**
9. Klappen Sie den Schutzdeckel der Probensammelkarte wieder zu und beschriften Sie den Deckel. Anschließend stecken Sie die Karte in den beiliegenden Umschlag und verschließen den. Der Umschlag enthält ein Päckchen mit einer Substanz, die die Probe stabilisiert. Beschriften Sie den Umschlag auf die gleiche Weise wie die Probensammelkarte.

Anweisung zur Beschriftung:

AF plus Initialen für den vermeintlichen Vater + aktuelles Datum

C plus Initialen für das Kind + aktuelles Datum

M plus Initialen für die Mutter + aktuelles Datum